

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- (1) 트레이(Tray)가 손상되거나 개봉되었는지 확인을 위해 외관을 검사한다.
주의 : 보호용 트레이 또는 뚜껑(lid)이 손상되었거나 개봉되었다면 트레이를 상자에 다시 넣어 제조자에게 반송한다.
- (2) 본 제품은 멸균 제품이므로 외부 트레이 뚜껑(tray lid)의 구석을 벗긴 후 멸균된 겔 주사기(gel syringe)를 포함하고 있는 내부 트레이를 꺼내어 무균 장소에서 시술자에게 제공한다.
- (3) 시술 전 의사는 환자에게 본 제품의 적응증, 금기사항, 부작용 등에 대해 충분히 설명하고 반드시 환자의 상태를 확인한다.
* 전문 의료인이 사용하여야 한다.

나. 사용방법

- (1) 내부 트레이에서 보호용 뚜껑(lid)를 벗겨 트레이로부터 주입액이 담긴 주사기와 트롬빈이 담긴 주사기를 꺼낸다.
- (2) 각각의 주사기 마개를 열어 주사기 팁(syringe tip)에 커넥터의 루어 락 허브(luer lock hub)를 부착시켜 서로 연결한다.
- (3) 겔(Gel)이 충전된 주사기의 밀대를 밀어 겔(Gel)을 트롬빈이 충전되어있는 주사기에 넣는다.
- (4) 양쪽 주사기의 밀대를 차례로 밀어 겔(Gel)과 트롬빈이 완전히 혼합될 수 있도록 20회 이상 혼합한다.
- (5) 혼합된 제품을 트롬빈이 충전되어 있던 주사기에 몰아넣은 후 비어있는 주사기를 제거한다.
- (6) 주사기 팁(syringe tip)에 캐놀러의 루어 락 허브(luer lock hub)를 부착시킨다.
- (7) 주사기 밀대에 압력을 가하여 시술부위에 도포한다.
- (8) 주사기에 잔량이 남지 않게 전량 투여한다.

다. 사용 후의 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 일회용이므로 투여 후 겔 주사기, 트롬빈 주사기, 커넥터 및 캐놀러를 폐기한다.
- (2) 본 제품의 재사용은 금지한다.