

## 사용 방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 반드시 제품의 사용설명서를 확인한다.
- 2) 사용 전 포장의 파손 또는 라벨의 상태 및 사용기한 등을 반드시 확인한 후 사용하며, 포장이 파손된 제품은 사용하지 말아야 한다.
- 3) 본 제품은 멸균 제품이므로 외부 트레이 뚜껑(Tray Lid)의 구석을 벗긴 후 멸균된 겔 주사기를 꺼내어 무균장소에서 시술자에게 제공한다.

### 나. 사용방법

- 1) 박스를 개봉한다.
- 2) 생리식염수, 링거액 등 관개 용액 등을 사용하여 일반적인 세정절차가 완료 된 후 관절경 마무리 단계에서 제품이 충전된 주사기를 멸균 수술 작업대로 전달한다.
- 3) 블리스터로부터 리드를 제거한후 주사기를 꺼낸다.
- 4) 팁캡을 제거하고 카테터와 결합시켜 안정되게 고정한다.
- 5) 투여하기 전에 기포가 존재하면 기포를 제거한 후 카테터를 통해 관절강 내에 제품을 주입한다.
- 6) 시술하고자 하는 부위에 해당 제품을 주입하여 잔류 관개 용액을 세척한 후에는 수술 시 미리 연결된 튜브를 통해 체외로 배출한다.

### 다. 조작순서

- 1) 관절경 수술을 마무리 한 후 제품의 팁캡을 제거하고 카테터를 연결한다.
- 2) 카테터와 결합 후 관을 통하여 제품을 주입한다.
- 3) 세척에 사용된 본 제품은 튜브를 통해 체외로 배출한다.
- 4) 절개된 수술 부위를 봉합한다.

### 라. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 개봉 후 미사용한 제품은 사용 유무에 관계없이 폐기한다.
- 2) 일회용이므로, 재사용 및 재멸균을 하지 않는다.