

사용 시 주의사항

1. 일반적 주의사항

- 1) 사용 전 제품의 유효기간을 확인한 후 사용한다
- 2) 제품 손상 여부를 확인하여 손상이 확인되었다면 사용해서는 안 된다.

2. 적용상의 주의사항

- 1) 본 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 숙지해야 한다.
- 2) 제품을 사용하기 전 관절경 수술 절차에 대한 일반적인 주의사항을 준수해야 한다.
- 3) 본 제품은 무릎 및 어깨 관절강 내에 정확히 주입해야만 한다.

3. 금기사항

- 1) 해당 제품 성분에 과도하게 민감한 경우 사용 전에 적절한 검사를 시행하고 제품의 구성성분에 대해 알려진 과민반응이 있는 경우 사용을 금지해야 한다.
- 2) 금기사항은 환자에 따라 상대적이거나 절대적일 수 있으며, 환자의 전체적인 상태에 따라서 주의하여 평가해야 한다.

4. 상호작용

- 1) 제사급 암모늄염으로 구성된 시술기구와 절대 접촉되지 않도록 한다

5. 부작용

- 1) 본 제품은 승인된 적응증과 사용방법에 설명된 용량을 사용했을 때에는 이상반응이 없을 것으로 기대된다. 다만 금기사항은 반드시 고려돼야 한다
- 2) 부종 등 부작용이 유발되지 않도록, 의사 등 전문가의 처방에 근거하여 환자별 관절의 크기에 따라 주입량을 적절히 조절해서 사용해야 하며, 특히 어깨 관절에 사용 시 무릎 관절에 비해 소량을 사용해야 한다.

6. 경고

- 1) 본 제품의 내용물인 패키지가 개봉되어 있거나 손상되지 않는 한 무균상태이나, 개봉 후 재멸균하여 사용해서는 안 된다
- 2) 개봉 후 사용하지 않은 제품은 폐기해야 하며, 박스에 표시된 유통기한이 지난 제품은 사용해서는 안 된다
- 3) 본 제품은 의사만이 사용해야 한다.
- 4) 본 제품을 사용하는 의사는 본 제품을 주입하기 전에 필요한 수술 방법을 충분히 익혀야 한다.
- 5) 견봉하 공간에는 관절막이 존재하지 않아 사용 시에 주변 연부조직, 근육, 건 사이로 제품이 흘러갈 가능성이 있으므로 시술 부위에 대한 해부학적 지식과 특별한 주의가 요구된다.
- 6) 견봉하 공간 사용 시에는 다수의 혈관에 노출 될 수 있으므로 주의하고, 혈관 내에 절대 주입하지 않는다.